

Préparation du médicament

Broyeur de comprimés Severo®

Afin de faciliter la prise de médicaments, le personnel soignant doit régulièrement broyer les comprimés des patients ayant des troubles de la déglutition.

Le broyeur électrique Severo® permet de **réduire en une fine poudre les comprimés** les plus durs, en moins de 8 secondes. Cet appareil a été développé en collaboration avec des professionnels de santé pour **éviter les troubles musculo-squelettiques** dûs au broyage manuel. Il évite également les contaminations croisées et peut être utilisé en temps masqué.

Le Severo® est déjà approuvé par de nombreux instituts.



Hygienne



Ergonomie

Points forts

- ▶ Simple, efficace et robuste
- ▶ Quasi silencieux
- ▶ Broyage sans effort ni risque de TMS
- ▶ Facilement nettoyable
- ▶ Léger et portable

Visionnez-moi



Préparation du médicament

Broyeur de comprimés Severo®

Broyeur Severo®

- ▶ Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm
- ▶ Autonomie : 500 cycles de broyage (≈ 3 jours d'utilisation en continu)
- ▶ Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)
- ▶ Poids : ≈ 1,5 kg
- ▶ Niveau sonore : 52 db
- ▶ Temps de chargement : 2 heures
- ▶ Garantie : 2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie

Désignation	Référence
Broyeur de comprimés Severo®	NA00030.01

Accessoires

Désignation	Référence
2100 gobelets à usage unique	NA00014.01
2000 couvercles à usage unique	NA00015.01
2100 rondelles à usage unique	NA00016
Stabilisateur Severo®	NA00040

Utilisation



1 Placez les médicaments dans le gobelet sans dépasser la première ligne.



2 Placez une rondelle puis la tête de broyage sur le gobelet. La rondelle est conseillée mais pas obligatoire.



3 Ouvrez le couvercle du Severo® en appuyant sur le bouton métallique.



4 Placez le gobelet avec la tête de broyage sur le plateau.



5 Fermez le couvercle du Severo® en exerçant une légère pression.



6 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le processus de broyage commence. La LED du bouton passe au vert une fois le broyage terminé.



7 Ouvrez le couvercle du Severo®. Soulevez la rondelle et la tête de broyage. Les médicaments sont réduits en fine poudre et peuvent être mélangés aux repas des patients ou au gel à avaler.



Gel à avaler

Le gel à avaler permet de masquer le goût amer des médicaments et n'affecte pas son action. Il ne contient ni sucre, ni alcool, ni substances allergènes courantes. Il convient à tous les patients.

Désignation	Référence
Gel saveur banane - 8 mL	NA00046
Gel saveur banane - 150 mL	NA00044
Gel saveur banane - 1L	NA00045
Gel saveur tutti frutti - 8 mL	NA00043
Gel saveur tutti frutti - 150 mL	NA00041
Gel saveur tutti frutti - 1L	NA00042